

KINTAMO SPAUDIMO ČIUŽINYS PRAGULOMS IŠVENGTI SU ELEKTRINIU ORO KOMPRESORIUMI (MODELIS VMC202 / VMC502)

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

1. Oro kompresorių padėkite ant lygaus ir stabilaus paviršiaus (pvz. ant grindų). Jei lova turi lovagalį pasinaudokite ištraukiamais kabliukais kurie yra kitoje oro kompresoriaus pusėje. Naudodamiesi kabliukais užkabinkite oro kompresorių ant lovagalio.
2. Čiužinį patieskite ant lovos taip, kad oro žarnelių pajungimo vietos būtų lovagalio pusėje (arba toje pat pusėje kur ir oro kompresorius).
3. Žarnelių pagalba sujunkite oro kompresorių su čiužiniu.
4. Laisvus čiužinio galus pakiškite po jūsų naudojamu įprastiniu čiužiniu (abiejose pusėse) (tik modeliui VMC202).
5. Įsitinkite, kad oro padavimo žarnelės nėra perlinkusio, o žarnelių pajungimo vietos nėra pakištos po įprastiniu čiužiniu.
6. Oro kompresoriaus reguliavimo rankenėlę pasukite laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi (iš kairės į dešinę) iki galo. Tokiu būdu oro kompresorius bus nustatytas dirbti maksimaliu galingumu.
7. Pajunkite oro kompresorių prie elektros tinklo.
8. Įjunkite oro kompresorių - jungiklis švies kai oro kompresorius bus įjungtas.
9. Nusistatykite pageidaujamą čiužinio spaudimą (čiužinio kietumą). Idealiu atveju tarp žmogaus kūno ir čiužinio dalies į kurią tuo metu nėra pučiamas oras turėtų tilpti du pirštai (statmenai) (tik modeliui VMC202). Čiužinio spaudimas yra reguliuojamas taip kaip aprašyta 6 punkte.
10. Jei atsiras būtinybė atjungti oro padavimo žarneles, niekada neatjunginėkite jų nuo čiužinio, kadangi galite pažeisti patį čiužinį. Atjunkite žarneles nuo oro kompresoriaus.
- 11. Pilnai pripūsti čiužinį trunka apie 20-30min.**
12. Nelaikykite čiužinio arti atviros ugnies šaltinio, nerūkykite ant čiužinio ir pan. Saugokite čiužinį nuo aštrių daiktų.

Gaminiui suteikiama 12 mėnesių garantija nuo pardavimo datos. Garantija negalioja mechaniniams čiužinio ir oro kompresoriaus pažeidimams (pradurimas, pradeginimas, sudaužymas ir pan.)

Dėl gedimų kreipkitės:

tel.: +370 687 44486
UAB „AMEDIKA“
el.p.: info@pragulos.lt
www.pragulos.lt